

Steriset® Kontenery Sterylizacyjne

Innowacyjna technologia pojemników wielokrotnego użytku

***Steriset*®**
bei MEDLINE, vormals WAGNER

**Sterylizowanie
Transport
Magazynowanie
Wielorazowość**



autoryzowany dystrybutor w Polsce:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA
os. Gruszkowe 3/5 62 – 035 Błażejów
tel. 061 817 02 18 www.anmed.com.pl anmed@anmed.com.pl

Odporne na błąd ludzki i bezpieczne za każdym razem

Systemy pojemników do sterylizacji wiążą się z dwoma istotnymi czynnikami ryzyka - błędem ludzkim i bezpieczeństwem higienicznym.

Kontenery SteriSet® eliminują te zagrożenia.

Unikalna technologia produkcji sprawia, że są to jedyne pojemniki na rynku w 100% wielokrotnego użytku.


System bezfiltrowy oraz automatycznie blokujący się zamek plombujący pomaga wyeliminować potencjalne błędy ludzkie, które mogą zagrozić sterylności instrumentów.

Ponadto każdy pojemnik SteriSet ma średnią żywotność powyżej 20 lat, co zapewnia długoterminowe aspekty oszczędnościowe i ekologiczne.

Zainwestuj dziś, oszczędzaj przez dekady

Wybierając system SteriSet gwarantujemy szybki zwrot inwestycji.

W kolejnych latach przyniesie to znaczne efekty.

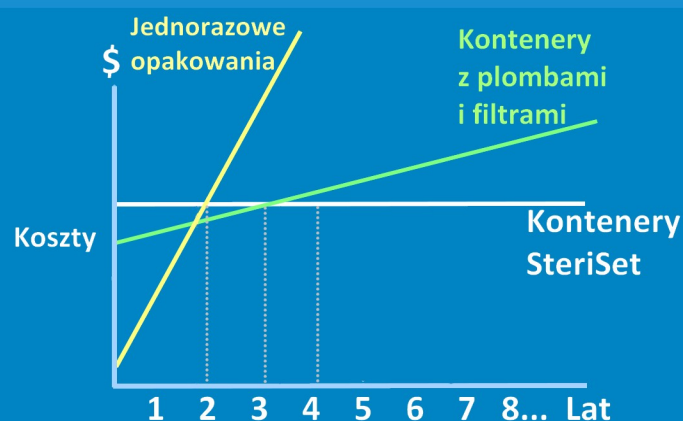

Większa wydajność

Łatwiejsza obsługa

Brak konieczności monitorowania cykli

Brak konieczności magazynowania materiałów zużywalnych



Bardziej higieniczne

Brak ryzyka błędu ludzkiego

Brak problemu uszkodzonych wsadów

Brak problemów z plombami jednorazowymi



Więcej oszczędności

Brak kosztów zakupów materiałów zużywalnych

Brak kosztów utylizacji odpadów

Innowacja zaprojektowana by wygrać Gwarancja najwyższej jakości

**System
podwójnej pokrywy**

**Zawór
ze stali nierdzewnej**

**ThermoLoc
system**

**Zawór
kondensatu**



Podwójna pokrywa dla bezpieczeństwa i ochrony

Konstrukcja podwójnej pokrywy umożliwia przedostawanie się pary do kontenera od boku — chroniąc jednocześnie wewnętrzną osłonę zaworu i wsad przed uszkodzeniem i zanieczyszczeniem.

- Trwała aluminiowa pokrywa zewnętrzna gwarantuje ochronę
- Chroni wewnętrzny zawór przed uszkodzeniem
- Chroni wsad przed kurzem, nadmiarem wilgoci oraz zanieczyszczeniami bakteriologicznymi



Konstrukcja SteriSet umożliwia układanie w stosy oszczędzając miejsce podczas sterylizacji, transportu i przechowywania



Identyfikowanie zestawów przy pomocy kolorowych silikonowych osłon rączek oraz tabliczek kodowych



Zawór ze stali nierdzewnej Biobariera zapewnia sterylność oraz całkowicie eliminuje odpady

Zawór ciśnieniowo-próżniowy ze stali nierdzewnej jest integralną częścią konstrukcji pokrywy wewnętrznej, stanowi skuteczną barierę dla mikroorganizmów podczas transportu i przechowywania. System jest niemal bezobsługowy, zawór nie wymaga demontażu na czas mycia, dezynfekcji i kontroli działania

- Eliminuje potrzebę stosowania jednorazowych filtrów papierowych
- Aktywowany ciśnieniem otwiera i zamyka się automatycznie podczas cyklu sterylizacji parowej
- Zawór pozostaje zamknięty po sterylizacji, zapewniając nieprzepuszczalną barierę, która utrzymuje sterylność wsadu

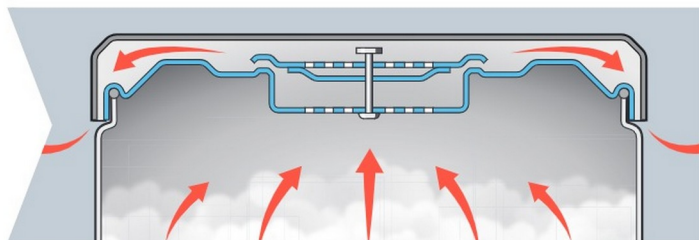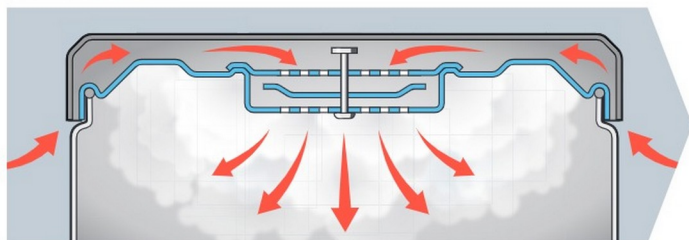

Jak to działa

Podczas cyklu sterylizacji, ciśnienie otwiera zawór, umożliwiając przedostanie się pary do kontenera i wysterylizowanie jego zawartości.

Podczas fazy próżni, zasysanie próżniowe otwiera zawór, umożliwiając wydostanie się pary z kontenera i wysuszenie jego wnętrza.


Zawór kondensatu dla cięższych wsadów

Zawór umieszczony w dnie wanny kontenera jest rozwiązaniem opcjonalnym polecanym dla wymagających i ciężkich wsadów


- Idealny do zestawów o wadze ponad 8 kg, które mają większe prawdopodobieństwo gromadzenia wilgoci
- Otwiera się, gdy temperatura sterylizacji osiągnie 130°C, umożliwiając odpływ powstałego kondensatu z pojemnika
- Zamyka się gdy temperatura w komorze spadnie poniżej 110°C, zapewniając suchy, w pełni chroniony wsad narzędzi



Jak to działa

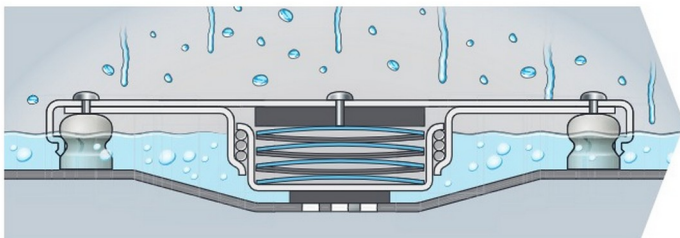

Dzięki pochylej konstrukcji dna wanny skondensowana woda gromadzi się wokół zamkniętego zaworu

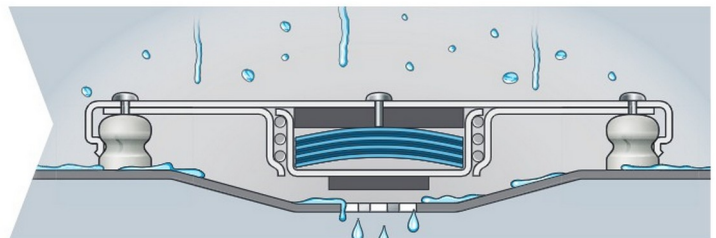

Zawór otwiera się gdy sterylizator osiągnie w komorze 130°C usuwając wodę zgromadzoną na dnie wanny kontenera

ThermoLoc® Strażnik sterylności

Aktywowany w temperaturze sterylizacji czerwony element wskaźnika wysuwa się i blokuje dostęp do pojemnika

- Inteligentny system blokowania ThermoLoc® aktywowany odpowiednią temperaturą blokuje pokrywę podczas cyklu sterylizacji
- Zapewnia, że kontener pozostanie szczelny do momentu otwarcia na sali operacyjnej
- Zapewnia zabezpieczenie przed manipulacją
- Eliminuje potrzebę stosowania jednorazowych plomb



ThermoLoc® przed sterylizacją

Jak to działa



ThermoLoc® po sterylizacji

Rozmiary dopasowane dla każdego zestawu narzędziowego



Kontenery sterylizacyjne:

wymiar zewnętrzny w mm	wymiar wewnętrzny w mm	typ
Kontener 1/2 (mały) 		
296x275x120	254x254x80	TVA 30
296x275x140	254x254x100	TVA 31
296x275x160	254x254x120	TVA 32
296x275x210	254x254x170	TVA 34
296x275x270	254x254x230	TVA 36
z zaworem do odprowadzania kondensatu		
296x275x120	254x254x60	TVA 37
296x275x140	254x254x80	TVA 38
296x275x180	254x254x120	TVA 39
296x275x230	254x254x170	TVA 3A
296x275x290	254x254x230	TVA 3B
Kontener 1/1 (duży) 		
596x275x120	554x254x80	TVA 60
596x275x140	554x254x100	TVA 61
596x275x160	554x254x120	TVA 62
596x275x210	554x254x170	TVA 64
596x275x270	554x254x230	TVA 66
z zaworem do odprowadzania kondensatu		
596x275x120	554x254x60	TVA 67
596x275x140	554x254x80	TVA 68
596x275x180	554x254x120	TVA 69
596x275x230	554x254x170	TVA 6A
596x275x290	554x254x230	TVA 6B
Kontener 3/4 (średni) 		
456x280x140	412x258x100	TVA 41
456x280x160	412x258x120	TVA 42
z zaworem do odprowadzania kondensatu		
456x280x140	412x258x80	TVA 48
456x280x180	412x258x120	TVA 49


Kosze ze stali nierdzewnej:

wymiar w mm	typ
Kosz siatkowy	
245x245x30 - 1/2	SCD 333
245x245x60 - 1/2	SCD 336
400x250x30 - 3/4	SCD 433
400x250x60 - 3/4	SCD 436
515x245x30 - 1/1	SCD 633
515x245x60 - 1/1	SCD 636
515x245x100 - 1/1	SCD 6310



Maty typu „język”:

wymiar w mm	typ
Maty silikonowa	
127x241 - mini	S315
241x241 - 1/2	S335
394x241 - 3/4	S435
470x241 - 1/1	S635

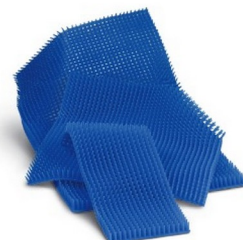

Kontenery mini

wymiar zewnętrzny w mm	typ
Kontener mini	
285x135x60	KVA10
285x135x80	KVA11
285x135x100	KVA12



Grawerowane tabliczki identyfikacyjne



Zrównoważony rozwój

Pojemniki do sterylizacji Steriset® są częścią programu zrównoważonego rozwoju greensmart®. Wszystkie produkty greensmart przechodzą rygorystyczną weryfikację, obejmującą cykl życia produktu i późniejszą utylizację

- Nasza wyjątkowa konstrukcja zaworu ze stali nierdzewnej eliminuje potrzebę stosowania jednorazowych filtrów
- Inteligentny system blokowania ThermoLoc® eliminuje stosowanie jednorazowych plomb plastikowych
- Średnia żywotność kontenera wynosi powyżej 20 lat
- System SteriSet może zmniejszyć zużycie jednorazowych opakowań nawet o 80%



Gwarancja i serwis kontenerów

System kontenerowy Steriset® objęty jest gwarancją posprzedażową. Firma ANMED prowadzi także autoryzowany serwis pogwarancyjny pojemników SteriSet

Dwie opcje wykonania serwisu:

- Wyślij nam swój kontener a my naprawimy go w naszym serwisie stacjonarnym
- Skorzystaj z usługi wykonania serwisu w Twojej placówce



Dział Techniczny ANMED dysponuje profesjonalnie wyposażonym parkiem narzędziowym oraz zespołem wykwalifikowanych inżynierów. Każdy z nich posiada stosowane kwalifikacje w zakresie konserwacji i serwisowania systemu kontenerów SteriSet. Dział Techniczny ANMED już od ponad 30 lat z powodzeniem prowadzi konserwację urządzeń medycznych w całej Polsce

Poproś o wycenę już dziś.

Skontaktuj się z przedstawicielem ANMED
Uzyskaj więcej szczegółów na temat naszej linii kontenerów Steriset.

ANMED autoryzowany dystrybutor Systemu SteriSet w Polsce:

WIELKOPOLSKIE CENTRUM ZAOPATRZENIA LECZNICTWA

os. Gruszkowe 3/5 62 – 035 Błażejowo

tel. 061 817 02 18 www.anmed.com.pl anmed@anmed.com.pl



**HIGIENA I STERYLIZACJA
W SZPITALNICTWIE**